

Kn95 Einweg-Atemschutzmaske



verfügbare Größen:

- 1 Stück (PZN: 05668381)
- 5 Stück (PZN: 05668056)

Einweg-Schutzmaske mit 95%-iger Bakterienfiltration. Außerdem geeignet gegen alle Arten von Feinstaub-Partikeln. Die Maske besteht aus 4-lagigem Vliesstoff und einem Kunststoff-Nasenstreifen, um sich der jeweiligen Nasenform anzupassen. Elastische Gummibänder werden über die Ohren gezogen und sorgen für einen sicheren angenehmen Halt. Dank der Gummibänder wird die Maske nicht mit einer Schlaufe gebunden.

Die Einweg-Schutzmaske besitzt folgende Eigenschaften:

- KN95-Maske mit CE-Kennzeichen & der Norm EN149:2001+A1:2009 gekennzeichnet
- 95% BFE-Filtration (Effizienz der Bakterienfiltration)
- kompaktes Design und Passform
- vierlagiger Vliesstoff
- elastische Gummibänder

Anwendungshinweise

1. Ein Gummiband in jede Hand nehmen und die Maske mit dem Nasenstück nach oben öffnen.
2. Maske auf das Gesicht setzen.
3. Ein Gummiband über jedes Ohr ziehen und so anpassen, dass sie bequem sitzen.
4. Den integrierten Nasenbügel der eigenen Nasenform anpassen. Den Nasenbügel dazu mit den Fingerspitzen auf beiden Seiten am Nasenrücken zusammendrücken.
5. Nase, Mundpartie und Kinn sollten nun nicht mehr sichtbar sein.

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch die Versiegelung prüfen. Maske nicht verwenden, wenn diese nicht richtig abgedichtet ist. Bei Atemausströmung sollte die Maske sofort gewechselt werden, da eine mögliche Beschädigung oder Kontaminierung vorliegen kann und eine optimale Anpassung an das Gesicht nicht mehr gewährleistet ist. Verwendungsdauer: Es wird empfohlen, die Maske nach einigen Stunden auszutauschen und nicht erneut zu verwenden. Nicht mit Wasser auswaschen. Ein nicht ordnungsgemäßer Gebrauch kann zu Krankheit oder Tod führen.